

PANCIA E VULVA GERIATRICA



DESCRIZIONE

Questa pancia con vulva geriatrica è stata progettata e realizzata per essere indossata da pazienti simulati o manichini. È realizzata interamente in silicone e ha un supporto in rete per evitare strappi. La pancia è perfetta per allattare Anne. È piccolo per il SimMan ma funziona bene con gli indumenti per coprire i lati e la schiena.

UTILIZZO

- Per i pazienti simulati è meglio indossare biancheria intima color carne che abbia anche la parte delle gambe sotto il modulo.
- Utilizzare la cinghia in velcro per collegare i lati sul retro.
- Indossa abiti sopra i bordi della pancia per un maggiore realismo.
- Sangue e sporco possono essere aggiunti dove necessario.
- GelFX può essere utilizzato per creare ferite o cicatrici.

MANUTENZIONE

- Può essere sciacquato con acqua saponata tiepida o disinfettato con alcool isopropilico
- Asciugare con panno in microfibra
- Utilizzare il talco per eliminare zone appiccicose o lucide
- Riporre in ambiente fresco e al riparo dalla luce